



6

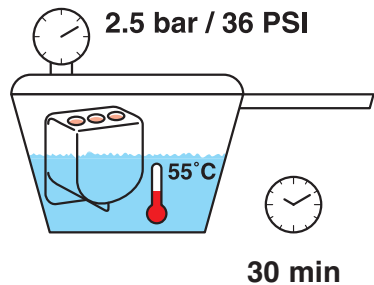


Vertex

Castapress

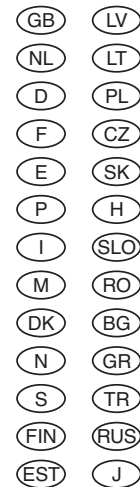



Vertex-Dental B.V.
The Netherlands
© +31 (0)30 6976749
www.vertex-dental.com



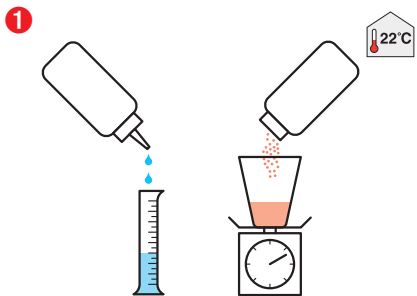


1 ml : 1,5 g


- ☞ Mix ratio
- ☞ Mengverhouding
- ☞ Mischverhältnis
- ☞ Taux de mixage
- ☞ Proporción de la mezcla
- ☞ Proporção de mistura
- ☞ Rapporto di dosaggio
- ☞ Proporzjon tat-taħlita
- ☞ Mix ratio
- ☞ Blandingsforhold
- ☞ Blandningsförhållande
- ☞ Sekoitussuhde
- ☞ Segu vahekord
- ☞ Maisījuma sastāvdaļu attiecība
- ☞ Mišinio komponentų santykis
- ☞ Proporcje mieszanek
- ☞ Směšovací poměr
- ☞ Pomer miešania
- ☞ Keверсі арány
- ☞ Mešalno razmerje
- ☞ Raport de amestecare
- ☞ Смеси́тельная пропорция
- ☞ Αναλογία ανάμειξης
- ☞ Karfilim Orani
- ☞ Пропорция смешивания
- ☞ 混合比率

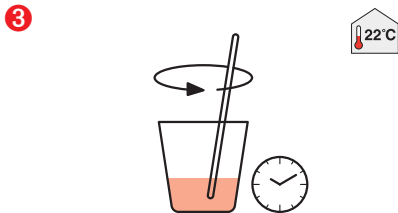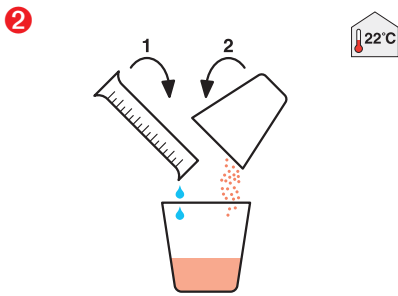

20 sec

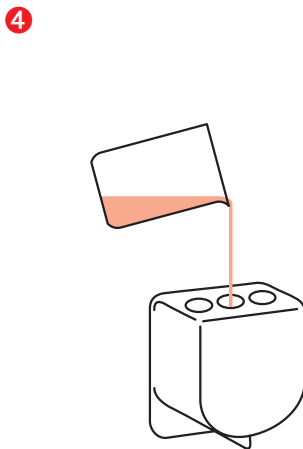

max 3 min

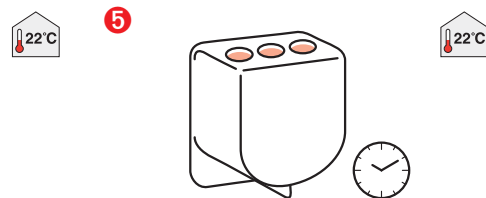

± 6 min

- ☞ Stationary moment on worktable
- ☞ Wacht moment op werktafel
- ☞ Ruhephase im Verarbeitungsprozess
- ☞ Temps de repos sur la table de travail
- ☞ Tiempo de reposo en la mesa de trabajo
- ☞ Momento estacionário em espera
- ☞ Fase stazionaria a banco
- ☞ Min li l-biċċa trid tiffalla toqgħod qabel jtkompla l-proċess
- ☞ Stationært øjeblik på arbejdsbord
- ☞ Stasjonær stund på arbeidsbord
- ☞ Stillastående tid på arbetsbord
- ☞ Levossa työskentelytasolla
- ☞ Stasionaarne moment töölaual
- ☞ Laiks, paredzēts protēzes, kas novietota uz darbgalda, galējai stingšanai.
- ☞ Laikas, skirtas protezo, padėto ant darbastalo, galutiniam sustingimui.
- ☞ Wymagany czas pozostawienia w bezruchu
- ☞ Kľidová doba na stole
- ☞ Pokojová doba na stole
- ☞ Mozdulatlanul hagyás időtartama
- ☞ Stacionarni moment na delovnem pultu
- ☞ Perioada de staționare pe placă de lucru
- ☞ Време на престой върху работната повърхност
- ☞ Χρόνος στασιμότητας επάνω στην τράπεζα εργασίας
- ☞ Čalifima masasinda sabit süre
- ☞ Время в состоянии покоя на рабочем столе
- ☞ 作業台での定常時間